




IRON WORKS FLY

Instruções de uso

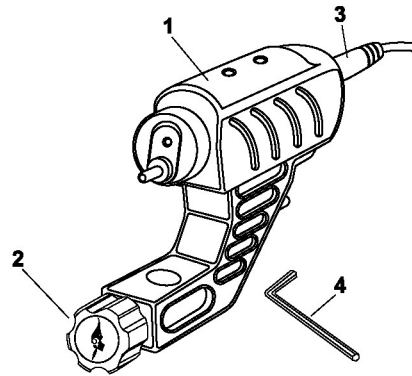

1) Regulador de Tensão 2) Aparelho
3) Cabo de Ligação 4) Chave Allen

IRON WORKS FLY

Descrição do Produto

Máquina IRON WORKS FLY para Micro Pigmentação Estética e Tatuagem Ornamental, composta por Cabo Elétrico, Aparelho, Regulador de Tensão e Chave Allen.

Indicação de Uso

A aparelhagem foi projetada e desenvolvida para realizar Pigmentação Estética e Tatuagens Ornamentais, em seres humanos, e deve ser utilizada por profissional.

Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

O princípio de funcionamento do aparelho IRON WORKS FLY é o Motor DC12 compacto e potente, que gira em torno de seu próprio eixo, produzindo movimentos de rotação. O acionamento é comandado através da conexão do cabo de alimentação e acionamento do pedal através do alimentador externo (fonte).

Especificações Técnicas:

Corpo (Chassis) Fibra Injetada
Micro Motor DC12V
Corrente: (sem carga): 0,075 A
Corrente(máxima eficiência): 0,47 A
Corrente (stall): 3 A
Rotação (máxima eficiência): 9840 RPM
Torque (máxima eficiência): 33.4 gf.cm
Torque (stall): 245 gf.cm
Diâmetro do eixo: 2 mm
Comprimento do eixo: 9,85 mm
Comprimento total com eixo: 45mm
Comprimento do corpo: 30,5mm
Altura do corpo: 18,3 mm
Peso: 35g

Dimensões do equipamento:

Comprimento do corpo (mm): 80,6
Altura do corpo: 60,9
Largura (mm): 20,7
Fonte externa: mínimo de 2,5 A
Tensão: 12 V
Voltagem 110-220w
Velocidade até 12500 RPM


Conteúdo da Embalagem:

01 Máquina IRON WORKS FLY (CORPO)
01 Cabo Elétrico (Cabo Manga 2x26 AWG)
01 Chave Allen
01 Manual de Garantia e Instruções de uso

Operação

Antes da primeira utilização leia este manual de instrução com atenção.

- 1- Conectar uma das extremidades do cabo elétrico em fonte externa de A (Amperagem) mínima de 2,5 para controlar a velocidade e a outra extremidade na Máquina IRON WORKS FLY;
- 2- Conectar o plug de acionamento ou pedal na entrada de energia da fonte externa;
- 3- Conectar a fonte externa de alimentação na rede elétrica (110-220volts);
- 4- Ainda com aparelho desligado, acoplar a biqueira descartável modelo de encaixe com registro na ANVISA;
- 5- Ligar o equipamento e então realizar os ajustes necessários de comprimento para execução do procedimento.
- 6- Uma vez terminado os ajustes necessários, executar a regulagem de potência desejada para a realização do procedimento através da regulagem de velocidade da fonte externa .

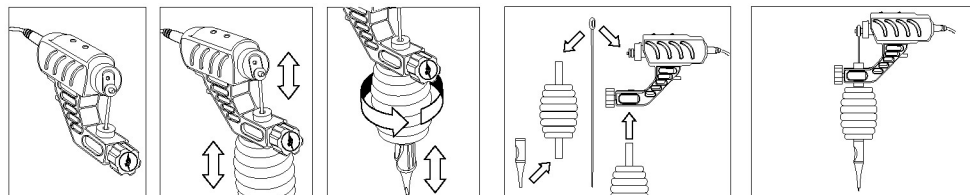

5 - Regulagem da Agulha, Ponteira e do Bico descartável

6 - Regulagem do Equipamento

Esterilidade do Produto

- Produto fornecido estéril: Não;
- Necessita ser esterilizado antes de uso: Não;
- Prazo de Validade: Indeterminado;
- Tempo de uso recomendável: Indeterminado;

Método de limpeza recomendado:

A fim de se evitar que a máquina possa ser contaminada quando submetida ao procedimento de Tatuagem Ornamental e/ou Micropigmentação Estética, aconselha-se encapá-la com um simples saquinho plástico, onde o mesmo deve ser descartado a cada procedimento.

Requisitos de manutenção:

Após o procedimento a IRON WORKS FLY deve ser separada da fonte de alimentação e colocada na base (suporte), para evitar danos e queda

Condições para Armazenamento:

Após o procedimento a IRON WORKS FLY deve ser separada da fonte de alimentação e colocada na base (suporte), para evitar danos e queda.

Manter o equipamento longe da umidade e calor em excesso.

Condições de Transporte:

Manter o equipamento longe da umidade e calor em excesso.

Limpeza e Desinfecção:

com seu equipamento já desligado e desconectado da rede elétrica iniciam-se a desmontagem do mesmo para descarte e limpeza.

Desencaixe a ponteira descartável até a sua total desconexão e descarte a mesma em recipiente para resíduos infectos contaminantes. Realizar a limpeza do equipamento utilizando álcool.

A fim de se evitar que a máquina possa ser contaminada quando submetida ao procedimento de Tatuagem Ornamental ou Micropigmentação Estética aconselha-se encapá-la com um simples saquinho plástico, onde o mesmo deve ser descartado a cada procedimento.

Advertências/Precauções

O equipamento foi projetado e fabricado para ser utilizado por um só Tatuador ou Micropigmentador.

Importante:

É obrigação do Tatuador ou Micropigmentador providenciar os equipamentos de proteção individual e informar o pessoal sobre o correto uso e manipulação dos mesmos.

Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que o operador (Tatuador/Micropigmentador) deve utilizar durante o procedimento e as operações de manutenção e limpeza são unicamente luvas de procedimentos e óculos de proteção. Além disso, a fim de evitar que a máquina possa ser contaminada quando submetida ao procedimento de Tatuagem Ornamental ou Micropigmentação Estética (Maquiagem definitiva) aconselha-se encapá-la com um simples saquinho plástico, onde o mesmo deve ser descartado a cada procedimento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso o sistema da sua Máquina IRON WORKS FLY falhar, favor contatar o Serviço de Suporte Técnico (11)3663.4080 imediatamente, sem violar o lacre.

O EQUIPAMENTO PERDERÁ A GARANTIA, CASO O LACRE QUE SE ENCONTRA NO APARELHO ESTIVER VIOLADO.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia de 1 ano contra defeitos de materiais e fabricação. Esta garantia não cobre defeitos provocados por queda ou avarias, peças não originais e componentes perecíveis pela ação do tempo por desgaste pelo uso normal. Os serviços de garantia serão prestados no Serviço de Suporte Técnico da IRON WORKS BRASIL - (11) 3663.4080.



IRON WORKS BRASIL

Aparelho para Tatuagem & Dermopigmentação

Fabricado por:
Iron Works Brasil Eireli
Rua Maritim Francisco, 518 - Vila Buarque
São Paulo / SP CEP 01226-000
CNPJ: 10.223.629/0001-54
Indústria Brasileira

ANVISA: 80590419001
Téc. Responsável: Fábio Biadene
CRQ 0442710
SAC: (11) 3663.4080
www.ironworksbrasil.com.br
contato@ironworksbrasil.com.br